

ІНСТРУКЦІЯ
із застосування медичного виробу

NASISOFT
Розчин стерильний для інгаляцій та промивання порожнини носа

Опис

NASISOFT – засіб для інтраназального та інгаляційного застосування. Має очищаючі та зволожуючі властивості.

NASISOFT очищує та зволожує слизову оболонку носової порожнини як у здорових осіб, так і у пацієнтів із запальними та алергічними захворюваннями органів дихання. NASISOFT полегшує дихання за рахунок розрідження секрету слизової оболонки носа, додаткових пазух носа та бронхів, сприяє його виведенню.

Склад NASISOFT:

1 мл розчину містить:

Гіалуронат натрію 1,0 мг;

Натрію хлорид 9,0 мг.

Показання

- Щоденна гігієна носової порожнини;
- Зволоження слизової оболонки носа в умовах сухого повітря;
- Очищення слизової оболонки носа від пилу, алергенів;
- Профілактика інфекційних захворювань дихальних шляхів;
- Комплексне лікування бронхіту, бронхіоліту, муковісцидозу, бронхоектатичної хвороби для розрідження мокротиння;
- Комплексне лікування гострих та хронічних захворювань носоглотки, носової порожнини та пазух, гіпертрофії аденоїдів у дітей, цілорічного та сезонного алергічного риніту;
- Післяопераційний період після операцій на органах носової порожнини.

Механізм дії

NASISOFT полегшує дихання за рахунок розрідження секрету слизової оболонки носа, додаткових пазух носа та бронхів, сприяє його виведенню.

Механізм дії кожного з компонентів:

Гіалуронова кислота є природнім компонентом (полісахаридом), що виконує в організмі ряд важливих біологічних функцій. Завдяки гідрофільним властивостям своєї молекули, гіалуронова кислота забезпечує високий ступінь гідратації в слизових оболонках дихальних шляхів, що у комплексі з розчином натрію хлориду сприяє зволоженню, створює умови для покращення мукоциліарного кліренсу. Також завдяки високому ступеню гідратації молекули гіалуронової кислоти утворюється бар'єр на поверхні слизової оболонки дихальних шляхів, що перешкоджає адгезії (прилипанню) антигенів (вірусів, бактерій, алергенів).

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.



Спосіб застосування та дози

NASISOFT призначений для інгаляційного застосування шляхом вдихання через рот або ніс за допомогою небулайзера та інтраназального введення.

Розчин не можна вводити шляхом ін'єкцій або ковтати.

Інструкція для використання NASISOFT за допомогою небулайзера

Для інгаляції використовують 2–4 мл розчину 2 рази на день. За необхідності кратність прийому може бути збільшена.

Інгаляція аерозолю може проводитись за допомогою спеціальної лицьової маски, мундштука або назальної канюлі.

1. Підготуйте до використання небулайзер.
2. Відкрийте полімерний пакет та вийміть звідти однодозовий контейнер. Переконайтеся, що контейнер не пошкоджено. Не виймайте контейнер з пакета, якщо в цьому немає потреби.
3. Струсіть контейнер, який вийняли. Інші контейнери залиште в полімерному пакеті та помістіть їх у картонну коробку.
4. Тримаючи контейнер за верхній край, поверніть інший край, щоб відкрити контейнер.
5. Вставте контейнер в небулайзер відкритим краєм вниз і легенько натисніть. Переконайтеся, що весь препарат перетік у небулайзер.
6. Зберіть небулайзер і використовуйте за призначенням.

Після використання промийте небулайзер, залишки препарату знешкодьте.

Інструкція для інтраназального введення NASISOFT

NASISOFT призначають:

- дітям віком від новонародженості до 7 років – по 1–2 краплі у кожний носовий хід 1–3 рази на добу;
- дітям віком від 7 до 12 років та підліткам 13–16 років – по 2 краплі у кожний носовий хід 2–4 рази на добу;
- дорослим – по 2–3 краплі у кожний носовий хід 3–6 разів на добу.

Перед застосуванням перевірити цілісність упаковки.

Перед інтраназальним введенням рекомендується очистити носові ходи.

Новонароджені: покласти дитину на бік.

Діти, дорослі: сидячи чи стоячи, голову нахилити набік. По черзі в кожний носовий хід вводять однодозовий контейнер та обережно натискають.

Уприскування необхідно провести в лівий носовий отвір, нахиливши голову праворуч та навпаки – у правий носовий отвір, нахиливши голову ліворуч. Процедуру найбільш ефективно проводити до вживання їжі.

Після процедури потрібно тримати голову прямо, щоб рідина могла вільно стікати з носа, витерти її гігієнічною серветкою.



Побічні реакції

NASISOFT, як правило, добре переноситься. В поодиноких випадках може виникати гіперемія слизової.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Протипоказань немає.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами

Не впливає.

Діти

Препарат може призначатися дітям з народження.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не описані.



UA.TR.039

Термін придатності: 2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в захищеному від сонячних променів місці при температурі від +5 °C до +30 °C

Упаковка.

По 2 мл або 4 мл у контейнерах полімерних, по 10 або 30 контейнерів у пачці з картону.

По 4 мл або 10 мл у флаконах скляних або полімерних, по 1 флакону у пачці з картону.







Назва та адреса виробника.

ТОВ «Юрія-фарм», Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10




Тел: +38 (044) 275-92-42; +38 (044) 275-01-08 www.uf.ua

Адреса виробництва: Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Вербовецького, 108

Графічні символи, вказані на споживчому пакуванні:

| | |
|---|--|
|  | THE SYMBOL OF METHOD OF STERILIZATION, DURING WHICH STEAM IS USED/ МЕТОД СТЕРИЛІЗАЦІЇ, ПІД ЧАС ЯКОГО ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПАР ЧИ СУХИЙ ЖАР |
|  | DO NOT RE-USE/ПОВТОРНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗАБОРОНЕНО |
|  | CONSULT INSTRUCTION FOR USE/ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ІНСТРУКЦІЯМИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ |
|  | MANUFACTURE/ВИРОБНИК |
|  | TEMPERATURE LIMIT/ТЕМПЕРАТУРНЕ ОБМЕЖЕННЯ |
|  | DATE OF MANUFACTURE/ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ |



| | |
|--|----------------------------|
|  | USE-BY DATE/ВИКОРИСТАТИ ДО |
|  | BATCH CODE/КОД ПАРТІЇ |
|  UA.TR.039 | ЗНАК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ |

