

Юлайзер™

Breath
of life

Як захистити свою
родину від застудних
захворювань?



Не хворіти застудою за будь-якої пори року та за будь-яких погодних умов — це дуже просто!

Потрібно лише своєчасно профілакуватися. А якщо застуда прокралася в родину — зробити все можливе, щоб попередити її розвиток.

В цьому допоможе сучасний спосіб лікування хвороб органів дихання — **Юлайзерна терапія.**



Юлайзер – це прилад, в якому лікарська рідина перетворюється в рідкий аерозоль (зі спеціальним розміром частинок) для інгаляції, що дає можливість лікування всіх захворювань органів дихання.

*Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та порадьтесь з лікарем.
Свідоцтво про держреєстрацію в МОЗ України №11172/2012 від 10.02.2012*

Головною перевагою небулайзерної терапії є можливість доставки препаратів прямо в дихальні шляхи.

Всмоктування ліків через слизову дихальних шляхів відбувається **в 20 (!) разів швидше**, ніж при прийомі таблетованих форм препаратів.

Головними складовими небулайзера є небулайзерна камера, де безпосередньо утворюється дрібнодисперсний аерозоль, і маска / загубник, завдяки яким аерозоль потрапляє безпосередньо до бронхіального дерева

Не хворіти застудою за будь-якої пори року та за будь-яких погодних умов — це дуже просто!



Небулайзерна камера



Маски: дитяча та доросла



Загубник



Канюля назальна

Комплектуючі небулайзера необхідно міняти **1 раз на три місяці**, тому що вони підлягають контамінації мікроорганізмами.

До того ж кожен пацієнт повинен мати індивідуальний набір для проведення небулайзерної терапії (небулайзерна камера, загубник / маска).

Існують декілька варіантів пакетів комплектуючих:

Великий набір Кіт Юлайзер, до комплекту входять:

- небулайзерна камера,
- загубник,
- повітряна трубка,
- повітряні фільтри;

Малий набір Юлайзер, до комплекту входять:

- небулайзерна камера
- загубник.

Окремо можна придбати:

- маску дитячу;
- маску дорослу;
- канюлю назальну.



ПОКАЗАННЯ ДЛЯ НЕБУЛАЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ:

- ГРВІ (риніт, фарингіт, ларингіт, трахеїт) та їх ускладнення (риносинусит, ларинготрахеїт);
- гострий бронхіт, пневмонія;
- бронхіальна астма та її загострення;
- загострення хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ);
- туберкульоз легень;
- муковісцидоз;
- важкий стан хворого (нездатність використання інших видів інгаляторів у дітей та людей похилого віку).



ЩО НЕ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ У КОМПРЕСОРНИХ НЕБУЛАЙЗЕРАХ?

- Трав'яні відвари, настої та настоянки
- Ефірні олії
- Системні гормони (Гідрокортизон, Преднізолон, Дексаметазон)
- Еуфілін, Платифілін, Папаверин
- Порошки з подрібнених таблеток
- Використовувати для розведення ліків кип'ячену воду та гіпотонічні розчини
- Буль-яку мінеральну воду, олійні та спиртові розчини



Для профілактики та лікування грипу та ГРВІ можливе застосування «протизастудної трійки»:



1 конт. АКК®

Блокує проникнення вірусів в клітини організму та попереджує розповсюдження інфекції



1 конт. Декасана®

Інгаляційний антисептичний засіб, що впливає на мікроби та віруси*



1 конт. NaCl

Зволожує та захищає слизову; розчинник для ліків небулайзерної терапії

Тривалість: 4–5 хв. 2–3 р/день. **Курс:** 7–10 днів

**Повну інформацію про препарат див. в офіційній інструкції*

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

Кашель та закладеність носу



або



1 конт. Лорде® Гіпер

зменшує в'язкість мокротиння
та полегшує його відходження*

1 конт. Лорде® Гіаль Гіпер

зменшує набряк слизової, зво-
жує слизову*

**Повну інформацію про препарат див. в офіційній інструкції*

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

Які ще існують препарати для лікування Юлайзером?



Інгаміст®

Ацетилцистеїн для
інгаляцій*



Небутамол®

Сальбутамол для
інгаляцій*



Небуфлюзон®

Флутиказону пропіонат
для інгаляцій*

**Повну інформацію про препарат див. в офіційній інструкції*

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

Який **небулайзер** обрати?



Для частохворюючих діток, хронічних хворих

Ергономічний дизайн.

Комплектуючі завжди під рукою – можна зберігати під кришкою.

Захист від перегрівання.

Ручка для переносу.

Юлайзер™ Air



Для активних, мобільних пацієнтів

Ультракомпактний.

10 інгаляцій від акумулятора.

В комплекті акумулятор та сумка.

Працює навіть від прикурювача в автомобілі.

Юлайзер™ Home



Оптимальний вибір для домашнього використання

Сучасний дизайн

Широкий вибір комплектуючих

Найбільш популярний небулайзер в Україні*

Proxima Research, 2016

Застосування **Юлайзерної терапії** дозволяє:

- Суттєво **підвищити ефективність** лікування.
- **Зменшити** кількість госпіталізацій в 2 рази.
- Зменшити кількість повторних викликів лікаря – **в 5 разів**.
- **Значно скоротити витрати** на надання медичної допомоги пацієнтам.



- Швидка доставка препарату, **швидкий початок дії (в 20 разів швидше** у порівнянні з per os).
- **Высока концентрація діючої речовини безпосередньо у вогнищі інфекції та** запалення.
- Не проходить крізь печінку, без барвників та ароматизаторів, **мінімум системних побічних реакцій**.
- **Економічна доступність** терапії.
- **Легкая техніка** інгаляції.

Сервісна підтримка «ЮРІЯ-ФАРМ»

Гаряча лінія – **044 454-75-63**

Ulizer.com.ua — можливість поставити запитання, відеоінструкція, як обрати, як користуватися – відповіді на найважливіші питання для зрозумілого та комфортного використання Юлайзер

«ЮРІЯ-ФАРМ» — експерт в небулайзерній терапії.

Ми поряд саме тоді, коли потрібно — оперативна консультація по телефону, в разі технічних проблем — можлива заміна, без очікувань та преривання процесу лікування!



ПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЧЕРЕЗ КОНТАКТИ

Чи знаєте ви, що...

Зараження інфекційними захворюваннями відбувається найчастіше через руки (рукостискання з хворою людиною, через дверні ручки, поручні в транспорті, побутові предмети і таке інше).



ШКОЛЯРИКУ У НАГОДІ БУДЕ ГОРОСТЕН — універсальний антисептик для рук!

До складу препарату входять компоненти, завдяки яким Горостен:

- надійно захищає від вірусів, бактерій та грибків;
- зволожує шкіру рук;
- знімає подразнення (підходить для чутливої шкіри);
- не викликає сухість навіть при багаторазовому застосуванні;
- не липне.



**Повну інформацію про препарат див. в офіційній інструкції*

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

Юлайзерна терапія
охороняє кордон
здоров'я вашої родини!



Юлайзер™

*Breath
of life*

Додаткова інформація
про Юлайзер на сайті:
www.ulaizer.com